

COMPONENTES DE LA CAMA

A	Cabecero curvo extraíble	I	Ruedas dobles Ø15 cm.
B	Control de membranas en las barandillas	J	Desbloqueo de cabeceros y pieceros
C	Indicador de inclinación respaldo	K	Pedal de frenado
D	Indicador de inclinación Trend y Antitrend	L	Quinta rueda
E	Barandillas de respaldo	M	Discos de protección
F	Lecho de HPL	N	Maneta CPR de emergencia
G	Pieceros curvos extraíbles	O	Cabecero anclado
H	Barandillas de extremidades	P	Lecho de chapa fija

OTRAS FUNCIONES

Barandillas (1):


- Elevación: Tirar de la barandilla hacia arriba hasta que quede inmobilizada en su posición más alta.
- Descenso: Tirar del asa que se encuentra debajo de la barandilla hacia afuera. La barandilla bajará automáticamente.

CPR de emergencia (2):


- Accionar cualquiera de las dos palancas situadas debajo del módulo del respaldo, acompañándolo a su vez durante el descenso.

Pedal de freno (3):



- Freno: Pedal en posición baja.
- Giro libre: Pedal en posición horizontal.
- Direccional o 5ª rueda: Pedal en posición elevada.

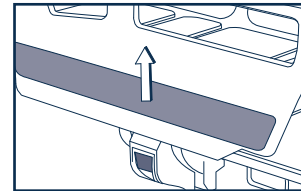


Elevar barandillas

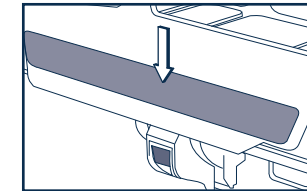


Descender barandillas

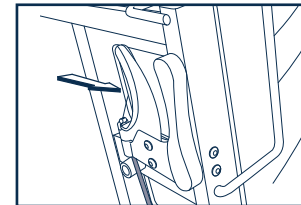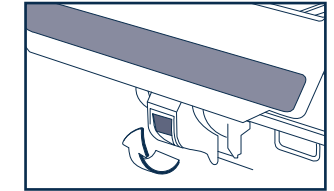


CPR de emergencia

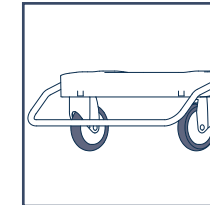

Freno

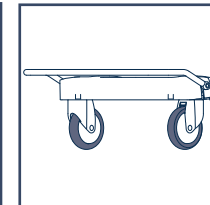

Movimiento libre

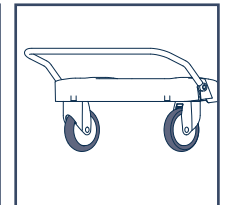

Direccional o 5ª rueda

LIMPIEZA

Limpieza y desinfección diaria con soluciones de cloro con una concentración mínima de 1000 mg/l:

- Barandillas, cabecero, piecero.

Limpieza y desinfección después de la salida de un paciente o antes de un traslado:

- Lecho de la cama, chasis de la cama.

Limpieza y desinfección a fondo cada dos meses:

- Soporte y elevación de la cama.

MANTENIMIENTO


Comprobar siempre el estado correcto de:

- Cableado eléctrico.
- Ruedas.
- Mecanismos de frenado.



MANDOS

INSTRUCCIONES DE USO

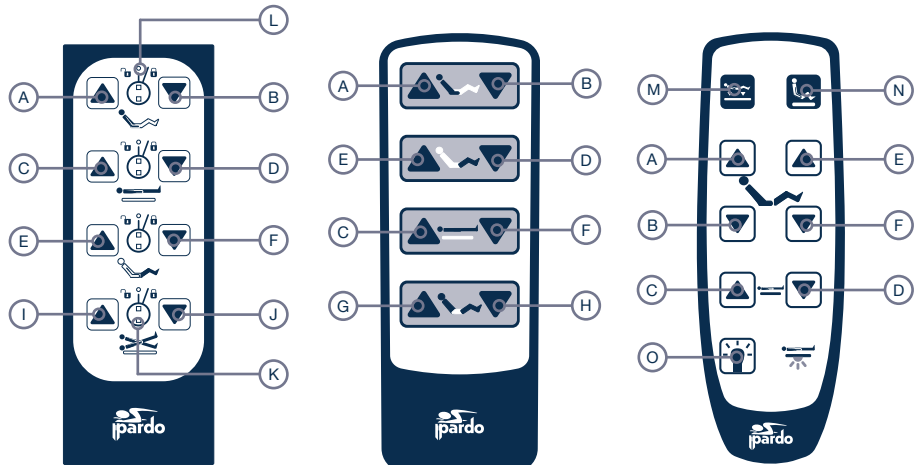


A	Subir respaldo	K	Bloqueo de movimientos	U	Seleccionar elevación
B	Bajar respaldo	L	Led indicador de bloqueo de movimientos	V	Seleccionar Trend/Antitrend
C	Subir lecho	M	Posición Flat (bajada simultánea de cuerpos)	W	Indicador de batería
D	Bajar lecho	N	Posición silla cardíaca	X	Posición exploración (altura máxima)
E	Subir piernas	O	Luz bajo cama	Y	Posición Trend de emergencia
F	Bajar piernas	P	CPR de emergencia	Z	Llamada a enfermería
G	Subir cuerpos simultáneamente (autocontour)	Q	Botón ON/OFF		
H	Bajar cuerpos simultáneamente (autocontour)	R	Posición salida segura		
I	Antitrend	T	Led indicador "Low position"		
J	Trend	U	Seleccionar cuerpos simultáneos		

Mando de paciente con bloqueos

Mando de paciente

Mando de paciente con luz

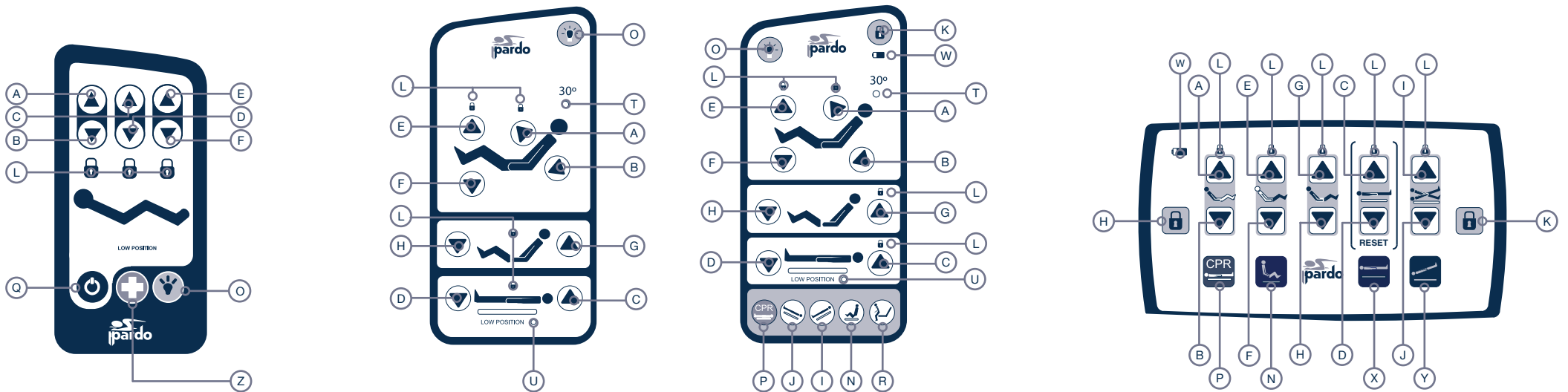

Membranas sin botón de bloqueo

Membranas de paciente

Membranas de enfermería

Mando de enfermería por cable



ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- En los movimientos de elevación y descenso de las partes móviles del lecho, con el resto de partes de la cama o los accesorios, se deberá comprobar que no se encuentra ningún obstáculo entre estos.
- La duración máxima de la maniobra continua no debe exceder los 2 minutos de lo contrario se pueden causar daños al equipo.
- El movimiento Trendelenburg y Antitrendelenburg debe realizarse siempre bajo supervisión médica.
- Cuando la cama se encuentre en su posición extendida no sentarse ni apoyarse en el extremo de los pies de la cama ya que podría producirse el volcado de la cama.
- No utilizar las manetas del accionamiento bilateral CPR para elevar el respaldo de la cama en ningún caso ya que podría producirse un fallo en el motor de elevación.

