


FICHA DE CONSULTA RÁPIDA

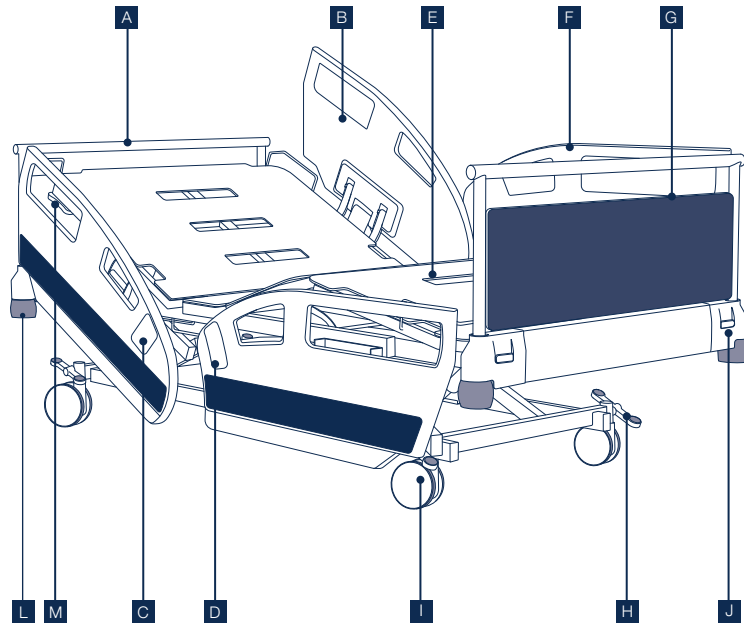

COMPONENTES DE LA CAMA

A	Cabecero extraíble de acero inoxidable	G	Picero extraíble de acero inoxidable
B	Barandillas de respaldo	H	Pedal de frenado
C	Indicador de inclinación respaldo	I	Ruedas dobles de 150 mm.
D	Indicador de inclinación Trend y Antitrend	J	Desbloqueo de cabeceros y piceros
E	Lecho de HPL	L	Discos de protección
F	Barandillas de extremidades	M	Maneta CPR de emergencia

OTRAS FUNCIONES

Barandillas (1):


- Elevación: Tirar de la barandilla hacia arriba hasta que quede inmobilizada en su posición más alta.
- Descenso: Tirar del asa que se encuentra debajo de la barandilla hacia afuera. La barandilla bajará automáticamente.

CPR de emergencia (2):


- Accionar cualquiera de las dos palancas situadas debajo del módulo del respaldo, acompañándolo a su vez durante el descenso.

Pedal de freno (3):



- Freno: Pedal en posición baja.
- Giro libre: Pedal en posición horizontal.
- Direccional: Pedal en posición elevada.

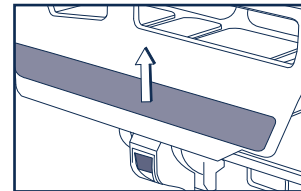


Elevar barandillas

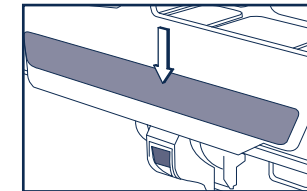


Descender barandillas

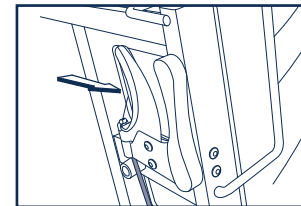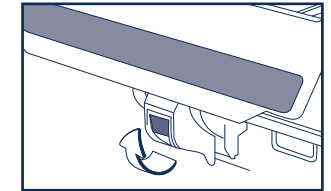


CPR de emergencia

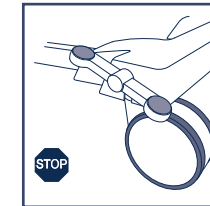

Freno

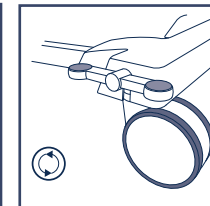

Movimiento libre

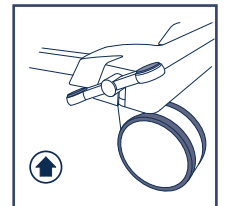

Direccional

LIMPIEZA

Limpieza y desinfección diaria con agua jabonosa:

- Barandillas, cabecero, picero.

Limpieza y desinfección después de la salida de un paciente o antes de un traslado:

- Lecho de la cama, chasis de la cama.

Limpieza y desinfección a fondo cada dos meses:

- Soporte y elevación de la cama.

MANTENIMIENTO


Comprobar siempre el estado correcto de:

- Cableado eléctrico.
- Ruedas.
- Mecanismos de frenado.




INSTRUCCIONES DE USO


A	Subir respaldo	E	Subir piernas	I	Antitrend	P	CPR de emergencia
B	Bajar respaldo	F	Bajar piernas	J	Trend	U	Bloqueo elevación respaldo
C	Subir lecho	G	Subir cuerpos simultáneamente (<i>autocontour</i>)	L	Led indicador de bloqueo de movimientos	V	Bloqueo elevación extremidades
D	Bajar lecho	H	Bajar cuerpos simultáneamente (<i>autocontour</i>)	N	Posición Silla cardíaca	W	Bloqueo elevación lecho

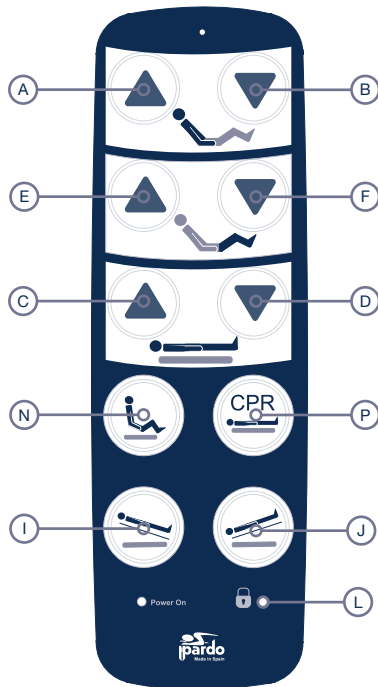

Mando de paciente con bloqueos

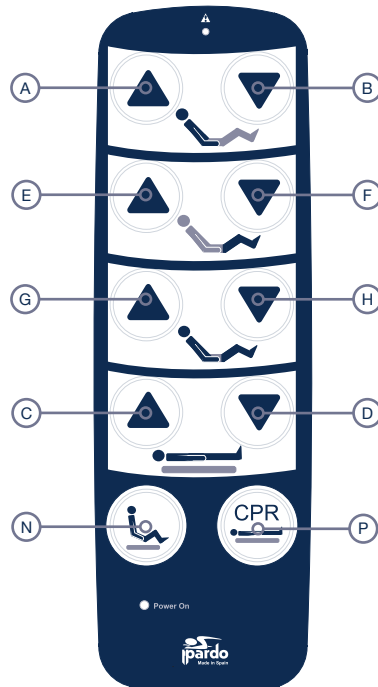

Mando de paciente sin bloqueos

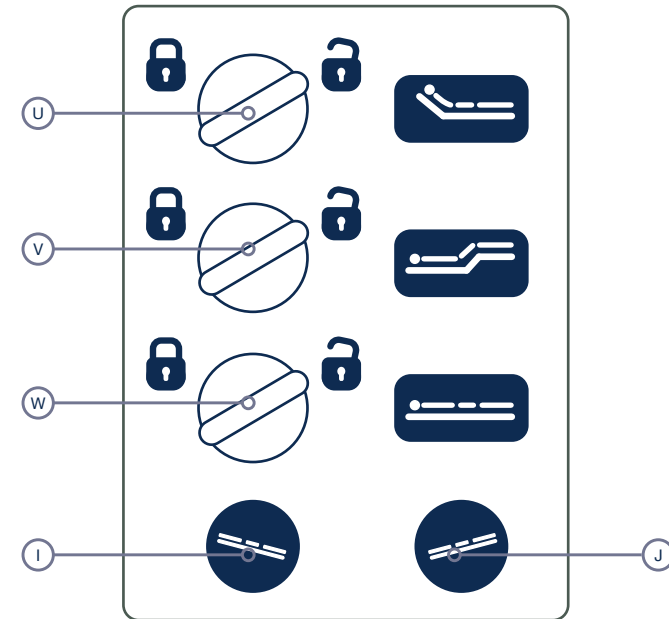

Caja de bloqueos de enfermería



ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- En los movimientos de elevación y descenso de las partes móviles del lecho, con el resto de partes de la cama o los accesorios, se deberá comprobar que no se encuentra ningún obstáculo entre estos.
- La duración máxima de la maniobra continua no debe exceder los 2 minutos de lo contrario se pueden causar daños al equipo.
- El movimiento Trendelenburg y Antitrendelenburg debe realizarse siempre bajo supervisión médica.
- Cuando la cama se encuentre en su posición extendida no sentarse ni apoyarse en el extremo de los pies de la cama ya que podría producirse el volcado de la cama.
- No utilizar las manetas del accionamiento bilateral CPR para elevar el respaldo de la cama en ningún caso ya que podría producirse un fallo en el motor de elevación.

