




Atril Volteable

FICHA DE CONSULTA RÁPIDA

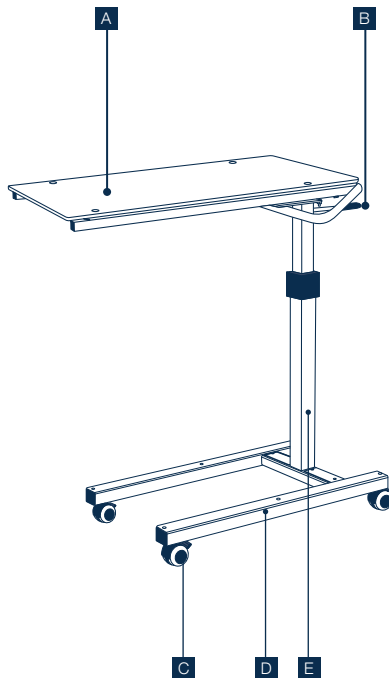


COMPONENTES DEL ATRIL

A	Tablero	D	Base en U o H
B	Palanca de elevación	E	Columna
C	Ruedas dobles Ø5 cm		

OTRAS FUNCIONES DEL ATRIL

Ruedas:


Para su traslado, la mesilla incorpora cuatro ruedas dobles de Ø5 cm con un freno individual en cada una de ellas.

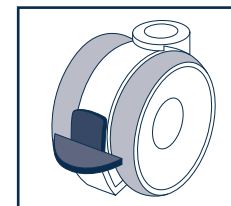


Ruedas con freno individual

Sistema de frenado:

- Activar freno: Pisar el pedal hasta su posición más baja, al activar el freno la rueda se bloqueará (1).
- Desactivar freno: Levantar con el pie el pedal hasta que quede en su posición más alta (2).

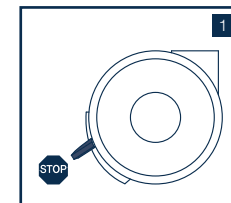

Freno

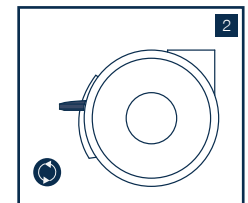

Movimiento libre

LIMPIEZA

Se recomienda limpiar la unidad mediante el uso de soluciones de cloro con una concentración máxima de 1000 mg/l.

Limpieza y desinfección después de la salida de un paciente:

- Tablero, asas, palancas o ruletas de elevación.

Limpieza y desinfección a fondo cada dos meses:

- Todo el atril.

MANTENIMIENTO

Comprobar siempre el estado correcto de:

- Ruedas.
- Mecanismo de elevación, reclinación y giro del atril.






OPERACIÓN MECÁNICA

Elevación y descenso del atril

Elevación por muelle o por pistón de gas:

- Accionar hacia arriba la palanca de regulación de altura, ubicada en la columna telescópica del atril, para elevar el tablero.
- Simultáneamente, sujetando el tablero, posicionar la mesa a la altura deseada y liberar la palanca de regulación para fijar la altura.
- Para descender el atril, accionar la palanca de regulación de altura y empujar suavemente el tablero hasta bajar a la altura deseada. Liberar la palanca de regulación para fijar la altura

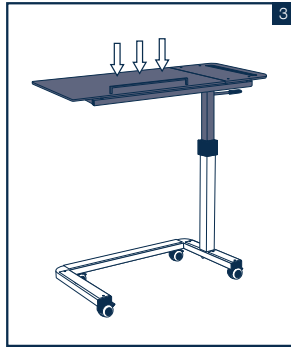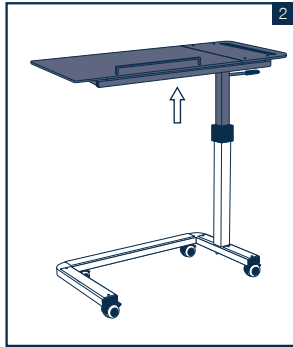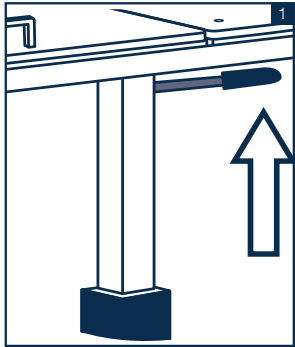


Inclinación del tablero:

- Para inclinar el tablero, sujetar la zona orientable desde la parte opuesta al arquillo, hasta alcanzar la posición requerida.
- Para volver a la posición horizontal, inclinar el tablero hasta alcanzar la máxima posición y seguidamente abatirlo hasta la horizontal.



Orientación del tablero:



- Inclinar el tablero a la posición máxima.
- Aflojar la maneta situada en el bastidor.
- Girar el tablero hacia el lado contrario al que esté colocado el tablero.
- Encajarlo en el bastidor.
- Apretar la maneta y posicionar en horizontal el tablero.

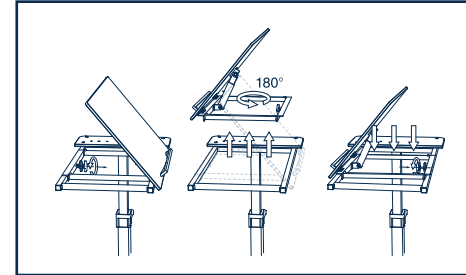

Inclinación del tablero

Voltear el tablero:


- Para realizar el volteo, sujetar el tablero desde la parte inferior del tablero y elevar/rotar el tablero hacia la parte exterior de la estructura, quedando el tablero posicionado por fuera de la base de la mesilla.

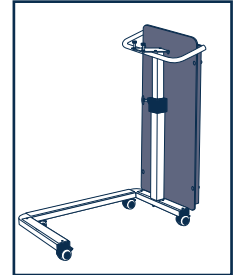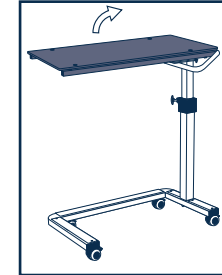


Volteo el tablero

OTRAS FUNCIONES DEL ATRIL

La base del atril puede ser en forma de "U" o en forma de "H"

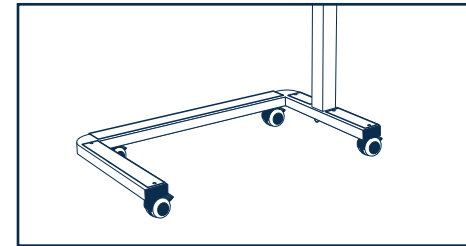

Base en forma de U

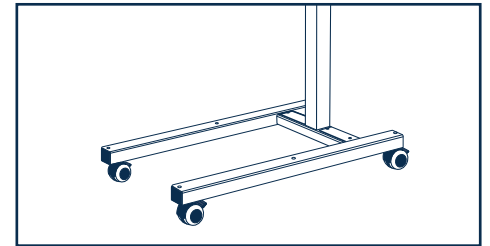

Base en forma de H

La empresa Industrias Hidráulicas Pardo S.L. cuenta con los siguientes certificados:



ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Existen riesgos de atrapamiento o aplastamiento al descender las partes móviles. Compruebe que en su descenso no se encuentra ningún obstáculo.
- Debe comprobar que no haya materiales, partes del cuerpo del usuario u otra persona cercana, que puedan interponerse entre la tabla y los elementos fijos.

